


## Nettoyage des appareils auditifs:

**1:** Le nettoyage s'effectue **à sec** si le tube n'est pas détaché de l'appareil


OU:

**2:** 1 fois par semaine le nettoyage à l'eau et produits SEULEMENT si le tube relié à l'embout est détaché du coude de l'appareil, et séché avant remontage.

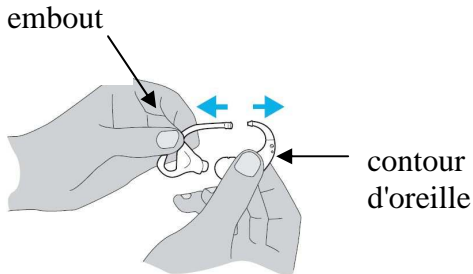


### 1 fois par semaine:

La première étape: désolidariser le tube relié à l'embout du contour d'oreille.

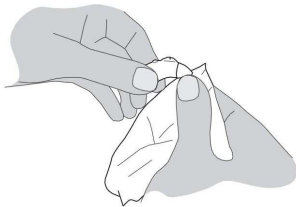

Vous pouvez essuyer le contour d'oreille avec un chiffon sec et doux.


Ne pas mouiller le contour d'oreille.

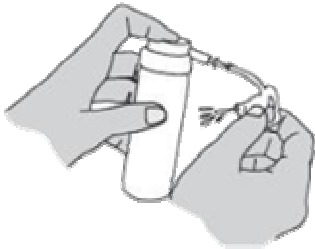

Nettoyage de l'embout:  
Vous pouvez utiliser des lingettes individuelles imprégnées ou le produit intrapro.



**surtout pas d'alcool!**

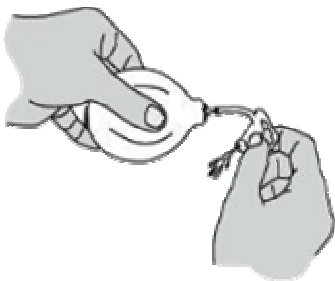

Essuyer avec un mouchoir en papier ou un chiffon doux.

Lorsqu'il reste de l'eau ou de l'humidité dans le tube de votre embout et les événements d'aération utilisez une poire soufflante ou une bombe à air sec pour les retirer.

Il suffit de presser la poire en dirigeant le bout sur l'élément à sécher ou en l'insérant dans le tube. Vous pouvez également utiliser un spray haute pression permettant **un séchage et un dépoussiérage rapide et efficace.**

